

FD8000+

Rethinking Dental




Steelmade aus Finnland

FD 8000+



Die FD 8000+ Dentaleinheiten sind das Ergebnis von 30 Jahren Entwicklung, die bewährte und solide Technologie mit modernem Design verbindet. Intelligente Elektronik ermöglicht eine komfortable Bedienung. Durch das funktionelle Speibecken und das effiziente Hygienesystem werden selbst Reinigung und Pflege zu einer angenehmen Aufgabe. Die FD 8000+ Serie wurde konzipiert, um über Jahrzehnte exzellent und zuverlässig zu sein.

Rethinking Dental

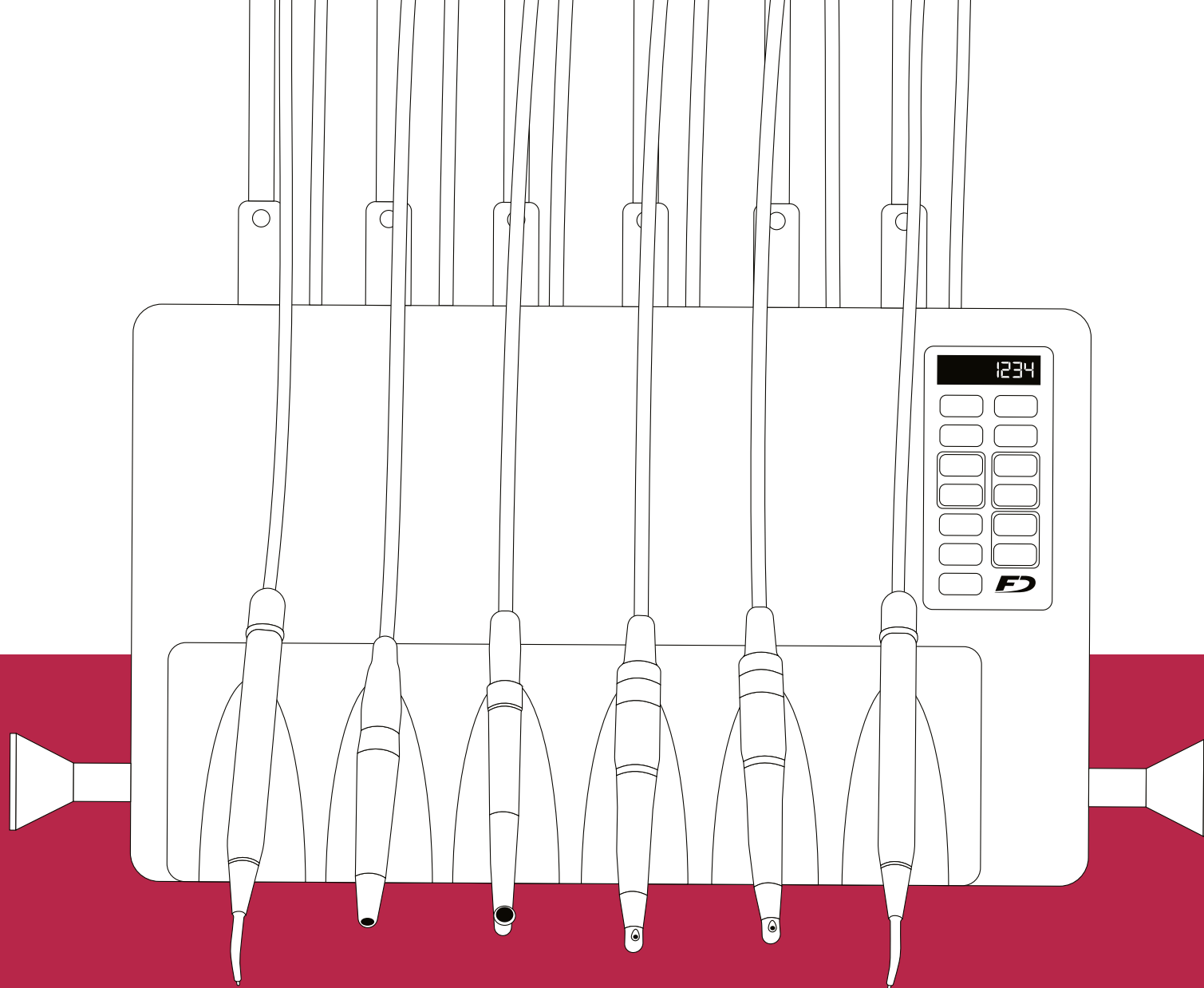


FD 8000+ B1

Die FD 8000+ B1 gewährt Ihnen mehr Vielseitigkeit und exklusive Möglichkeiten. Die elegant gestaltete 6-Linien-Instrumentenbrücke verfügt über hochwertige und ausbalancierte Schwingbügel mit der neusten Ergonomie Generation, die minimale Belastung bei maximalem Bewegungsspielraum bietet.

Die FD 8000+B1X Brücke ist die Weiterentwicklung und besitzt ein doppeltes Display. Beide Displays bieten dieselben Funktionen, dadurch ist sie optimiert für Rechts- und Linkshänder.

FD 8000+ B1X

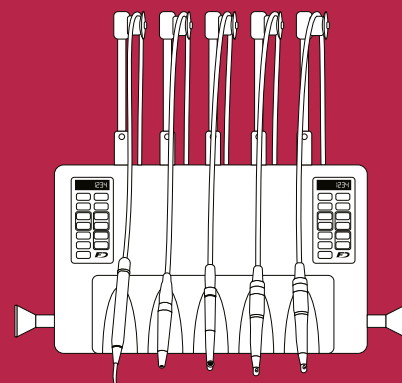




FD 8000+ B2

Die FD 8000+B2 Einheit ist mit hängenden Schläuchen und einer großen Instrumenten-Tray-Ablage ausgestattet. Die FD 8000+B1 und B2 Behandlungseinheiten sind ausgestattet mit einem modernen Glasspeibecken (optional drehbar), einem Teleskop-Absaugarm mit neuem 3+Bedienelement für die umfassende Steuerung des Speibeckens und des Patientenstuhls.

FD 8000+ Special



Bleiben Sie einzigartig! Mit den FD 8000 + Behandlungseinheiten bieten wir Ihnen eine einzigartige Gestaltungsmöglichkeit. Designen Sie Ihre Einheit individuell und geben Sie damit Ihren Praxisräumen eine unverwechselbare Note. Der Funktionsumfang ist ebenfalls frei nach Ihren Wünschen konfigurierbar.

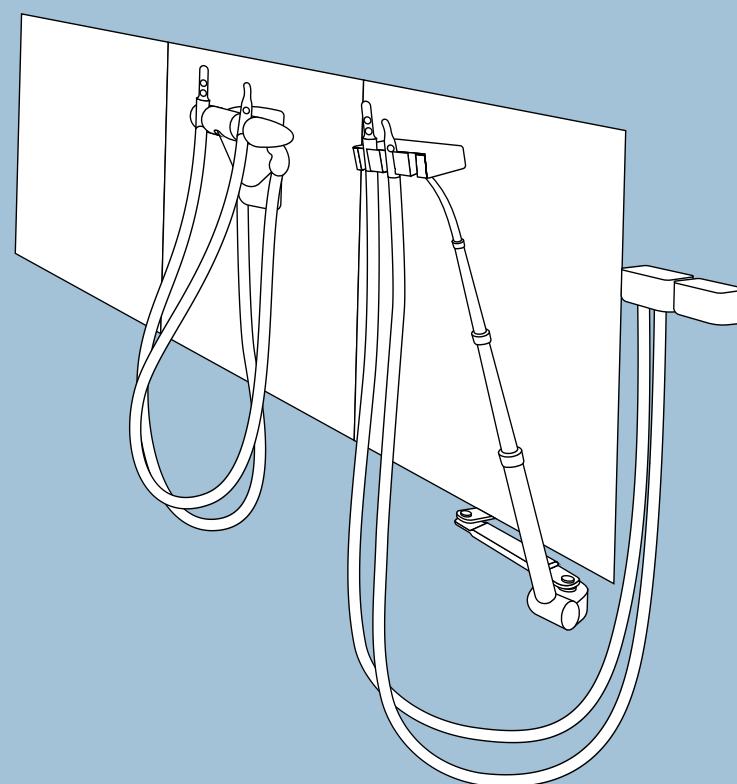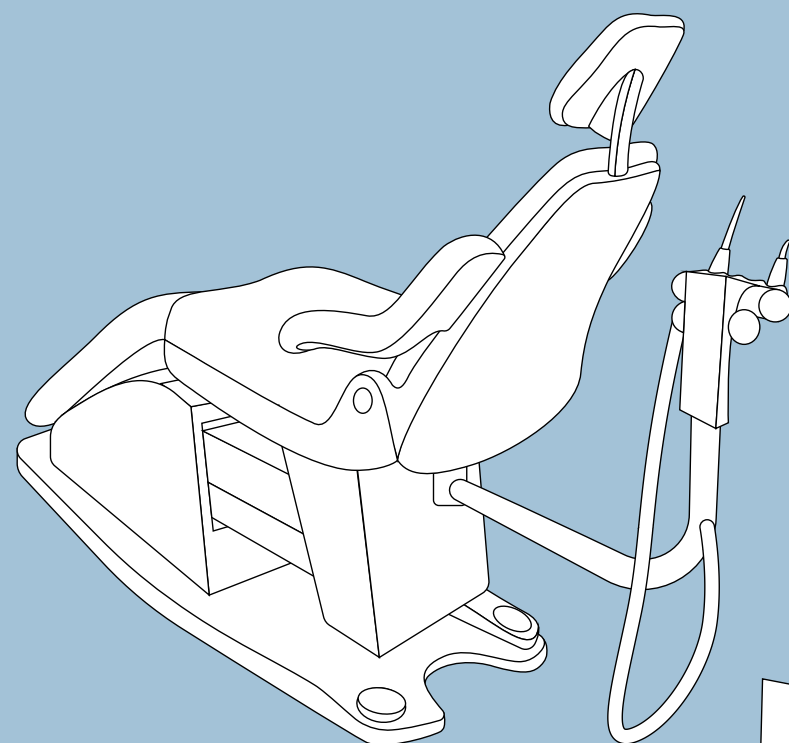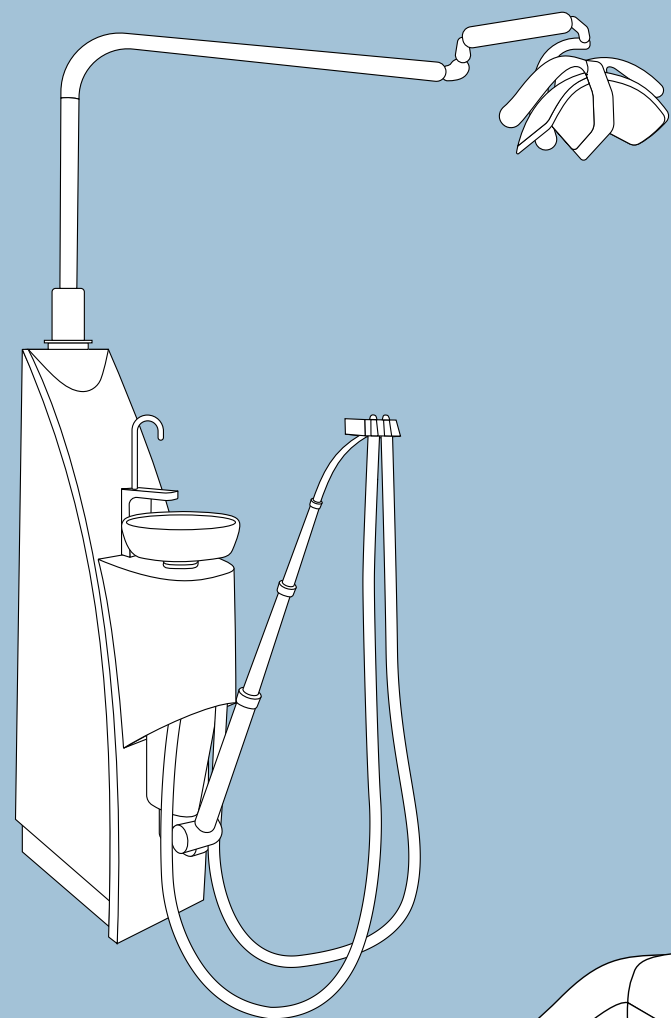

FD 8000+ ASSISTENZ

Die FD 8000+ Assistenz ist in drei Varianten erhältlich: klassisch am Speibecken montiert, am Behandlungsstuhl fixiert oder als Hinterkopfabsaugung. Wählen Sie zwischen unterschiedlichen Absaugvarianten, Funktions-spritzen und Bedienelementen für den Mundglasfüller.

FD8000+ KFO

Die FD 8000+KFO ist eine kieferorthopädische Behandlungseinheit mit höchstem Bedienkomfort. Die großen Tray-Ablagen sowie die individuell bestückbare Instrumenteneinheit am Assistenzelement erlauben eine individuelle und ergonomische Arbeitsweise in jeder Position.



FD 8000+ P1

Die FD 8000+P1 ist eine deckenmontierte Behandlungseinheit, die viel Platz für eine verbesserte Arbeitsergonomie und einen optimierten klinischen Arbeitsablauf gewährt. Diese einzigartige Finndent-Innovation lässt Ihnen jegliche Freiheit der Praxisgestaltung – die Symmetrie der P1 ist ideal für Rechts- und Linkshänder.

Instrumente



Scaler

Der Scaler besitzt eine automatische Leistungsregelung. Er kann für alle Anwendungen wie Scaling, Endo, Perio und prothetische Behandlungen verwendet werden. Alle Scaler können mit einer LED-Lichtfunktion ausgestattet werden.



Intraoral-Kamera

Eine Intraoralkamera macht eine Untersuchung nicht nur schneller und effizienter, sondern sorgt auch für mehr Akzeptanz der gewählten Behandlung beim Patienten.



Multifunktionsspritze

Wählen Sie aus zwei verschiedenen Optionen: Die 3-Funktionsspritze mit Kaltluft, Kaltwasser und Sprühnebel oder die 6-Funktionsspritze bei der die o.g. Funktionen erwärmt werden können.

Mikromotoren




Der Mikromotor ist ein leichter, hochleistungsstarker, bürstenloser und somit wartungsarmer Motor mit einem starken LED-Licht zur Detailfeldausleuchtung.



Rethinking Dental




OP-Lampe

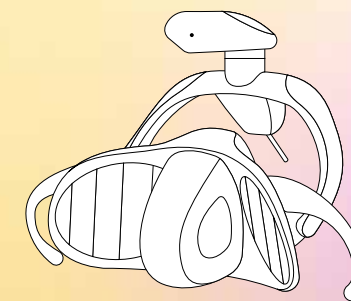

MAIA

Die Beleuchtungsstärke der FARO Maia reicht von 3.000 bis 35.000 Lux, ist stufenlos regulierbar und hat bei jeder Beleuchtungsstärke eine Farbtemperatur von 5000 K. Die Konzeption bringt einen optimalen Lichtkegeleffekt (Elipse von 9x6 mm) mit sich, der die Schattenbildung von Instrumenten und natürlichen Barrieren auf ein Minimum reduziert. Optimal für die Reinigung sind die abnehmbaren Griffe.

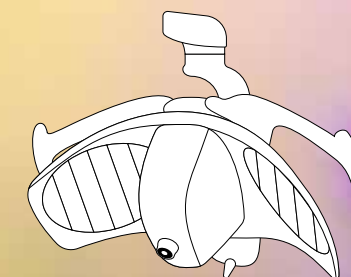

EVA

Die EVA TUNABLE WHITE hat dieselbe Bauart wie die Maia, jedoch reicht die Beleuchtungsstärke von 3.000 bis 45.000 Lux und bietet die Möglichkeit, die ideale Farbtemperatur für den anstehenden zahnärztlichen Eingriff auszuwählen: 5700 K, 5000 K, 4000 K, 2700 K Funktion Composave. Für die zahnärztliche Dokumentation besteht die Option des Einbaus einer Kamerafunktion.





(Richtwerte der Toleranzen hinterlegt)

Hygiene

Ein hochwertiges, optimiertes System zur Einhaltung maximaler Hygiene und deontologischer Anforderungen. Die Einheiten sind als Bottle- oder Anschluss-System erhältlich - ideal für die passive und aktive Hygiene. Glatte, geschlossene Stahloberflächen für die mühelose und vollständige Reinigung und Desinfektion.



Weitergedacht - die automatische Instrumentenschlauch Reinigung mit BioFinndent Reinigungsflüssigkeit zur bequemen Pflege der wasserführenden Schläuche.

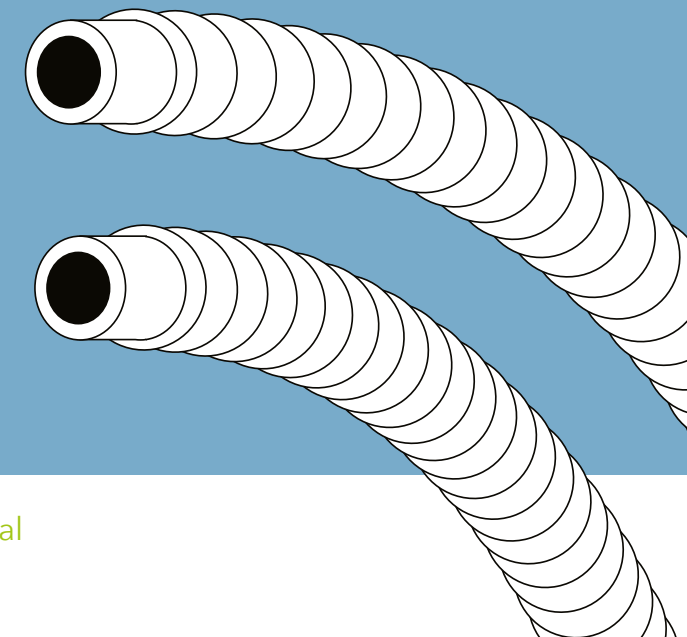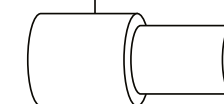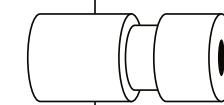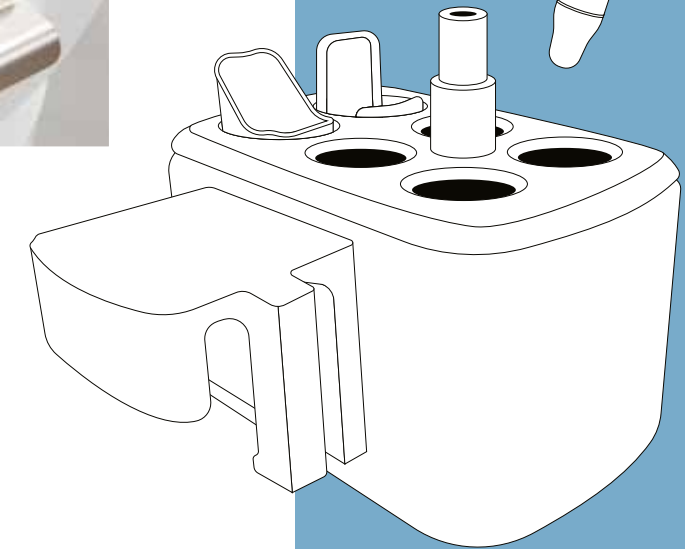

FD 8000+

FD 5000



STANDARD

FINNDENT Behandlungsstühle sind ergonomisch gestaltet und bieten sowohl dem Patienten als auch dem/der Zahnarzt/-ärztin eine komfortable Behandlungsumgebung. Der FD 5000 ist unsere Premium-Lösung und besteht aus einem Gestell aus verzinktem Stahl sowie einer nasslackierten Aluminium-Rückenlehne und Sitzfläche. Er ist bekannt für seine Zuverlässigkeit und Langlebigkeit. Eine eingebaute Drehfunktion um 30° ermöglicht flexibles Arbeiten.



SOFT KOMFORT

Die FINNDENT-Softpolster passen sich sanft an den Körper an. Das hochwertige Material aus Memo-Schaum ist weich, wo es nachgeben soll, und fest, wo es stützen soll, sodass Patienten auch bei längeren Behandlungen das Gefühl haben, schwerelos zu sein.

PREMIUM PARTNER WEST

SHR 
dent concept gmbh

SHR dent concept GmbH · Kruppstraße 10 · D-47475 Kamp-Lintfort · Telefon +49 2842 90 999 0

www.shr-dental.de · info@shr-dental.de ·  · 

